

## **CICASTICK SUTURVET kirurško ljepilo, 2 g**

### **Ljepljivo sredstvo za tkivo**

CICASTICK je ljepilo za tkivo koje se koristi u veterini za proces zacjeljivanja rana.

Proizvod je u tekućem stanju, ali se nakon kontakta s tkivom brzo polimerizira i prelazi u čvrsto stanje, čime pomaže u zacjeljivanju rane.

Ponekad omogućuje izbjegavanje korištenja zavoja i šavova, dok istovremeno djeluje kao barijera koja sprječava kontaminaciju rane.

Ljepilo za tkivo se samo od sebe odvaja kako rana zacjeljuje.

Pakiranje sadrži patentirani sustav koji omogućuje da proizvod stoji uspravno nakon otvaranja.

#### **Uputa:**

- Proizvod treba biti na sobnoj temperaturi (ne zagrijavati).
- Postavite čep i zavrnite. Spreman je za upotrebu.
- Nakon upotrebe, višak proizvoda s otvora bočice ukloniti papirnatim ručnikom i ponovno zatvoriti čep.

#### **Upotreba kod kirurških rana:**

- Ošišati dlaku s područja koje će se tretirati.
- Oprati područje sapunom, isprati i osušiti.
- Po potrebi nanjeti povidon-jod, klorheksidin ili izopropilni alkohol.
- Nakon završetka operacije, krajevi rane ili reza moraju biti što suši.
- Nanijeti tanki sloj CICASTICK-a na to područje.

#### **Uvjeti skladištenja:**

Držati čvrsto zatvoreno, na hladnom i suhom mjestu, u uspravnom položaju (stand up sustav).

Može se stvoriti bijela tvar oko otvora bočice s vanjske strane, što je normalno i ne utječe na učinkovitost ili kvalitetu proizvoda.

#### **Mjere opreza:**

1. Držati izvan dohvata djece.
2. Izbjegavati kontakt s očima i sluznicama životinje.
3. Izbjegavati kontakt proizvoda s veterinarskim instrumentima i rukavicama.
4. **NE KORISTITI** ako je ljepilo gušće od vode na sobnoj temperaturi – to znači da je proizvod djelomično polimerizirao i rana se neće dobro zacjeliti.
5. **NE KORISTITI** interno, na dubokim ili inficiranim ranama, niti ispod epiderme.

**Pakiranje:** Tuba s 2 g proizvoda s aplikatorom.

**Rok valjanosti:** Otisnut na ambalaži.

**Proizvođač:** Chemical Iberica, Ctra.Burgos-Portugal Km256,37448 Calzade de don Diego, (Salamanca), Španjolska

**Veterinarski kontrolni broj objekta:** αESP37000327

**Zemlja podrijetla:** Španjolska

**Ekskluzivni distributer za R.Hrvatsku:** Vet Consulting d.o.o., Matije Gupca 42, Daruvar.

E-mail: [vetconsulting@vetconsulting.hr](mailto:vetconsulting@vetconsulting.hr) telefon: 043 440 527

